

CHOKING CHARLIE

Réf. 102-00001

Mode d'emploi

Le Choking Charlie est livré avec les éléments suivants :

- ❖ 1 Torse Choking Charlie réf. 102-00001
- ❖ 4 corps étrangers de remplacement
- ❖ 1 flacon de talc
- ❖ 1 débardeur
- ❖ 1 valise de transport

Le Choking Charlie est un mannequin réaliste simulant une victime en état de choc ne pouvant parler ou respirer en raison de l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger.

Il est tout particulièrement conçu pour un entraînement à la manœuvre d'Heimlich et au coup de poing précordial. La qualité de sa fabrication et le remplacement facile des pièces détachées vous permettent d'utiliser votre mannequin pendant des années, dans la mesure où vous en prenez soin et où l'entretien est régulièrement effectué.

RECOMMANDATIONS : assurez-vous que le corps étranger est bien logé au fond de la gorge du Choking Charlie. Aucun air ne doit s'échapper. L'expulsion du corps étranger sera ainsi facilitée lors de la pratique de la méthode d'Heimlich.



PREPARATION DU MANNEQUIN

Insertion du corps étranger

1. Mettre un peu de talc sur le corps étranger avant de le mettre dans la bouche du mannequin.
2. A l'aide de votre index, pousser le corps étranger en passant le premier point de résistance jusque dans la gorge.
3. **NE PAS CONSERVER LE CORPS ETRANGER A L'INTERIEUR DE LA BOUCHE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISE.**

RECOMMANDATIONS : le talc sert à simuler une salive normale dans la gorge et doit être souvent appliqué afin de diminuer le frottement entre le corps étranger et la bouche.
Assurez-vous que le corps étranger est bien logé au fond de la gorge du Choking Charlie. Aucun air ne doit s'échapper.

MODE D'EMPLOI

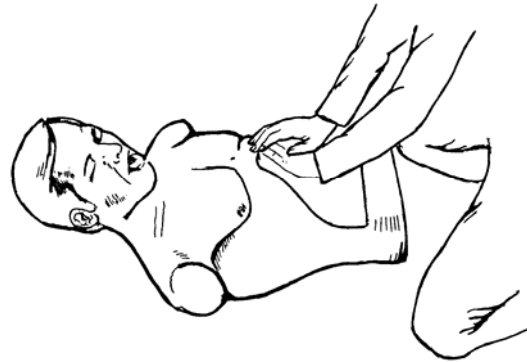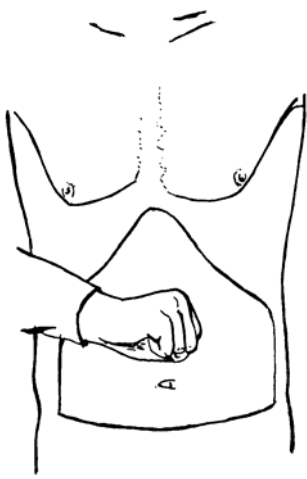

1. Le mannequin peut être utilisé pour simuler soit une victime consciente, soit une victime inconsciente.
2. Réaliser la simulation de l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger selon les normes en vigueur.

ENTRETIEN

1. Toujours travailler sur une surface propre. EVITER LES MARQUEURS, LES STYLOS ENCRE, L'ACETONE, L'IODINE OU AUTRES AGENTS TACHANT. NE PAS METTRE LE MANNEQUIN SUR DU PAPIER JOURNAL.
2. Nettoyer avec du savon et de l'eau. NE PAS IMMERGER LE MANNEQUIN.
3. Contrôler régulièrement le matériel.
4. Le ranger correctement à la fin de chaque session de formation.

PIECES DETACHEES

<i>Réf.</i>	<i>Désignation</i>
102-00150	Corps étrangers, Choking Charlie – mousse (4)
100-00560	Débardeur, bleu, taille moyenne
100-00750	Valise, Torse

GARANTIE - REPARATIONS

Le Choking Charlie PS-1800 est garanti **un (1) an**. Tout défaut doit être signalé dans les trente (30) jours à partir de la date d'expédition pour rentrer dans le cadre de la garantie. Laerdal Médical AS ne sera pas rendu responsable en cas de réparations effectuées par du personnel non qualifié ou d'utilisation non conforme.

Pour toute demande de réparation, contactez le S.A.V. chez Laerdal Médical France.

www.laerdal.fr