

# **BABY HIPPY**

Mode d'emploi



## TABLE DES MATIERES

<b>Contenu:</b> .....	2
<b>Mode d'emploi:</b> .....	2
<b>Précautions et entretien:</b> .....	3

---

Le Baby Hippy (réf. 375-35001) simule le bassin et les membres inférieurs d'un nouveau-né de sexe féminin. Il est spécialement conçu pour former les professionnels aux manoeuvres d'Ortolani et de Barlow.

La qualité de fabrication de ce produit devrait permettre d'assurer de nombreuses années de formation s'il est correctement entretenu.

**Contenu:**

1. Baby Hippy
2. Mode d'emploi
3. Livret de garantie globale laerdal

**Mode d'emploi:**

1. La hanche gauche est luxée. Le signe ou manoeuvre d'Ortolani va réduire la tête fémorale, l'examineur perçoit alors un ressaut dit "de rentrée" indiquant que la hanche est luxée mais qu'elle est réductible.
2. La hanche droite figure une luxation congénitale grave. Elle permet de rechercher la sensation de piston et donc d'instabilité de la hanche par la manoeuvre de Barlow.

**Attention:**

Le Baby Hippy n'est pas conçu pour tester une abduction totale de la hanche en flexion. Des tentatives pour réaliser une abduction totale provoqueraient une déchirure de la peau du simulateur. La garantie ne couvrira pas une telle déchirure qui fait suite à une mauvaise utilisation.

## **Précautions et entretien:**

1. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau ; ne pas immerger le mannequin ou les pièces détachées dans des détergents ou dans de l'eau.
2. Travailler toujours sur une surface propre. Éviter l'utilisation de marqueurs, stylos à encre, d'acétone, d'iode ou autres agents colorants et ne pas mettre le mannequin sur du papier journal, cela risquerait de le tacher.
3. Pour garantir une bonne longévité, chaque mannequin et chaque module doivent être nettoyés à la fin de chaque session de formation et un contrôle général doit être effectué régulièrement.
4. Les modules et toutes les autres pièces détachées doivent être vidés et correctement séchés à l'air avant d'être rangés et désinfectés si nécessaire.
5. Mettre un peu de talc sur les pièces d'articulation avant les sessions de formation.
6. Ranger les pièces correctement entre chaque session de formation.

### **Attention:**

Ce produit contient du latex qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques au contact de la peau.