

# JAMBE D'ENTRAINEMENT A LA PERFUSION PEDIATRIQUE

Mode d'emploi



## TABLE DES MATIERES

<b>Contenu:</b> .....	3
<b>Techniques enseignées</b> .....	3
<b>Mode d'emploi:</b> .....	3
<b>Remplacement de la peau et des veines</b> .....	3
<b>Précautions et entretien:</b> .....	4
<b>Pièces de rechange:</b> .....	5

---

La jambe d'entraînement à la perfusion pédiatrique (réf. 365-00101) est une reproduction réaliste de la jambe gauche d'un nouveau-né. Elle est conçue spécialement pour permettre l'entraînement des professionnels à la pratique de ponction veineuse.

La qualité de fabrication et la facilité de remplacement des pièces détachées de ce produit permettent d'assurer de nombreuses années de formation s'il est correctement entretenu.

**Recommandation de Laerdal :**

Ponction veineuse – Aiguille de taille 23 G

**Remarques de l'instructeur :**

## **Contenu:**

1. Jambe d'entraînement à la perfusion pédiatrique
2. Livret de garantie globale Laerdal
3. Mode d'emploi

## **Techniques enseignées**

- Simulation d'une piqûre du talon
- Retour veineux réaliste
- Perfusion
- Ponction veineuse sur les sites médians et malléolaires

## **Mode d'emploi:**

1. Remplir une seringue de 12cc avec un liquide (un concentré de sang simulé est disponible chez Laerdal Médical).
2. Fixer la seringue remplie de liquide à l'extrémité d'une des veines en latex.
3. Injecter lentement le liquide en le laissant s'écouler dans la jambe jusqu'à ce qu'il sorte par l'extrémité de l'autre veine en latex
4. A l'aide d'un clamp ou d'un dispositif similaire, clamer la veine en latex par laquelle le liquide s'écoule.

La jambe de perfusion est prête pour l'entraînement à la ponction veineuse.

## **Remplacement de la peau et des veines**

1. Faire glisser la peau usagée jusqu'en bas et hors de la jambe
2. Insérer le tuyau dans les trous de la nouvelle peau
3. Tirer le tuyau par les trous en faisant glisser la nouvelle peau le long de la jambe
4. Visser le pied sur la partie supérieure de la jambe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'obtention de la bonne position.

## Précautions et entretien:

1. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau ; ne pas immerger le mannequin ou les pièces détachées dans des détergents ou dans de l'eau.
2. Travailler toujours sur une surface propre. Éviter l'utilisation de marqueurs, stylos à encre, d'acétone, d'iode ou autres agents colorants et ne pas mettre le mannequin sur du papier journal, cela risquerait de le tacher.
3. Pour garantir une bonne longévité, chaque mannequin et chaque module doivent être nettoyés à la fin de chaque session de formation et un contrôle général doit être effectué régulièrement.
4. Les modules et toutes les autres pièces détachées doivent être vidés et correctement séchés à l'air avant d'être rangés et désinfectés si nécessaire. Après utilisation des coussinets de perfusion (n'utiliser que de l'eau), l'eau accumulée doit être expulsée. **Ne pas ranger des coussinets humides à l'intérieur de la peau.** Pour empêcher toute moisissure ou rouille, les coussinets peuvent être trempés dans une solution douce composée d'eau additionnée de désinfectant ou de javel.
5. Mettre un peu de talc sur les pièces d'articulation avant les sessions de formation.
6. Ranger les pièces correctement entre chaque session de formation.

### **Attention:**

Ce produit contient du latex susceptible de provoquer des réactions allergiques en cas de contact avec la peau.

**Pièces de rechange:**

Les pièces détachées suivantes correspondent à la couleur de peau de type méditerranéen. Pour toute demande concernant des pièces détachées d'une autre couleur, contacter votre agence Laerdal.

**Référence**

365-01050

365-01150

365-02850

**Désignation**

Jambe nue

Peau de la jambe

Tuyau