

BABY IVY

Mode d'emploi

TABLE DES MATIERES

Contenu:	2
Mode d'emploi:	2
Précautions et entretien:	3
Pièces de rechange	3

Le Baby Ivy est une tête de nouveau-né réaliste. Il est conçu spécialement pour former les professionnels à la pratique de la mise en place d'un cathéter sur la veine épicroténienne.

La qualité de fabrication et la facilité de remplacement des pièces individuelles de cette tête devraient permettre d'assurer de nombreuses années de formation si elle est correctement entretenue

Contenu:

1. Baby Ivy
2. Livret de garantie globale Laerdal
3. Mode d'emploi

Mode d'emploi:

1. Ouvrir le couvercle et remplir le réservoir de sang avec de l'eau
2. Ajouter le concentré de sang jusqu'à l'obtention de la couleur désirée
3. Fermer la valve sur le flacon de sang
4. fermer la valve sur la poire
5. Pour pressuriser le système, pomper à l'aide de la poire deux ou trois fois pour gonfler légèrement le ballonnet
6. Relâcher progressivement la valve sur le flacon de sang et vider le liquide dans une tasse jusqu'à l'évacuation complète de l'air dans les tuyaux.
7. Refermer le couvercle et commencer la procédure.

Pour vider le système :

1. Ouvrir la valve sur la poire
2. Ouvrir la valve sur le flacon de sang et fermer le couvercle.

Le liquide va revenir s'écouler dans le réservoir de sang.

REMARQUE : Avant de ranger le produit pour une certaine durée, insérer une seringue dans le tuyau à l'extrémité du flacon de sang et injecter de l'air pour envoyer tout reste de liquide hors du tuyau dans le réservoir de sang.

Précautions et entretien:

1. Nettoyer avec du savon doux et de l'eau ; ne pas immerger le mannequin ou les pièces détachées dans des détergents ou dans de l'eau.
2. Travailler toujours sur une surface propre. Éviter l'utilisation de marqueurs, stylos à encre, d'acétone, d'iode ou autres agents colorants et ne pas mettre le mannequin sur du papier journal, cela risquerait de le tacher.
3. Pour garantir une bonne longévité, chaque mannequin et chaque module doivent être nettoyés à la fin de chaque session de formation et un contrôle général doit être effectué régulièrement.
4. Les modules et toutes les autres pièces détachées doivent être vidés et correctement séchés à l'air avant d'être rangés et désinfectés si nécessaire.
5. Mettre un peu de talc sur les pièces d'articulation avant les sessions de formation.
6. Ranger les pièces correctement entre chaque session de formation.

Pièces de rechange

Référence	Désignation
375-30150	Tête de remplacement
375-30250	Valise et ensemble de Tuyaux de remplacement
300-00750	Concentré de sang simulé