

# Resusci Anne hygiëne tijdens en na de les



# Hygiëne tijdens de les

- Luchtwegen hebben eenrichtingssysteem
- Geen aandacht tijdens de les
- Gelaatsmasker na iedere cursist desinfecteren
- Desinfecteren met Virkonspray
- 30 Sec. wachten
- Daarna afdrogen



# Tijdens de les

## HYGIËNE Tijdens de les

*Ontsmetting* Het is handig om iedere cursist een eigen aangezichtshuid te geven.



Ze is eenvoudig te verwijderen door ze aan de oren los te maken

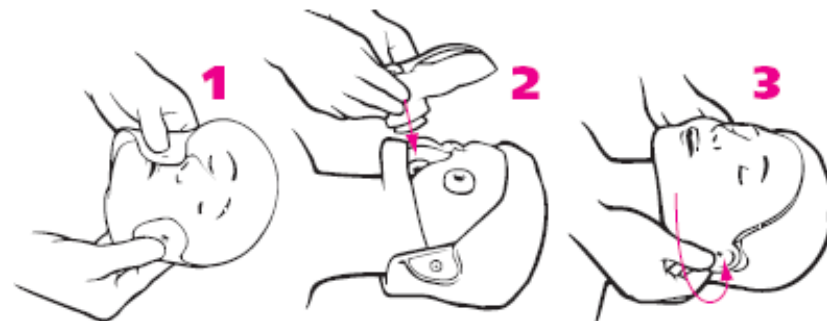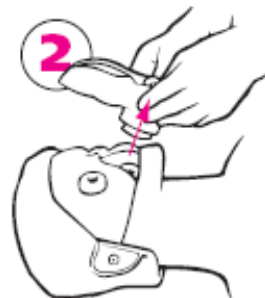

Terugplaatsen doet u door de aangezichtshuid binnenste buiten te vouwen en op de gelaatskoppeling aan te drukken.

Bevestig aan de houders van beide oren.



**Laerdal**  
helping save lives

# Verwijderen van de gezichtshuid

1



Oren losmaken, bij oudere modellen zit dit onder de haren

2



Gezichtshuid verwijderen

3



Longen losmaken van de gezichtshuid

# Ontsmetten van de gezichtshuid

## **Als dit niet mogelijk is moet u de aangezichtshuid na elke cursus ontsmetten:**

- u gebruikt de Virkon®spray, en laat 30 seconden inwerken, waarna u droogt met een compres;
- u gebruikt de Manikin Wipes.

## **Virkon®, een Laerdal desinfectiemiddel**

Virkon is een desinfectiemiddel in poedervorm. Er zijn twee verpakkingswijzen (concentraties):

- Rapid Pack is een Virkon®verpakking van 3 gram. U vult een bijgeleverd spuitflesje van 100 ml waarin u het poeder in lauw water oplost. U ziet het poeder oplossen met een roze verkleuring en licht bruisend effect. Daarna sluit u het flesje. Het is goed als u de klik hoort. Dit geeft een 3% oplossing, geschikt voor ontsmetting van de aangezichtshuid tijdens de oefeningen;




- Terminal Pack is een Virkon®verpakking van 50 gram. U vult een bad met 5 liter water, en lost hierin het poeder op. Dit geeft een 10% oplossing, geschikt voor onderdompeling van de gereinigde aangezichtshuid na de oefeningen. Na tien minuten onderdompeling spoelt u de aangezichtshuiden overvloedig, waarna u ze droogt. Bij deze concentratie is het aangewezen beschermhandschoenen te dragen.

## De Virkon wordt gebruikt na iedere cursist



1  
Spray de Virkon na gebruik op de gezichtshuid

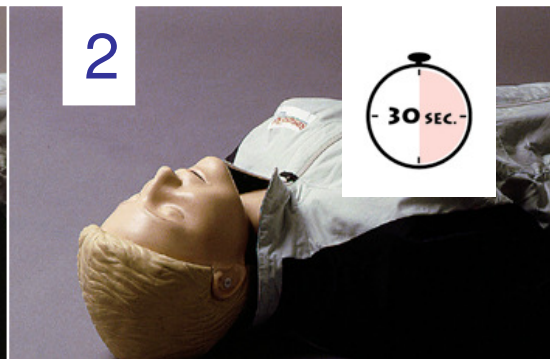

2  
30 seconden wachten



3  
Met een doekje nadrogen

# Manikin Wipes

## Manikin Wipes, een Laerdal desinfectiemiddel

Manikin Wipes zijn individueel  
verpakte desinfectiedoekjes,  
verkrijgbaar in verpakkingen van  
50 en 1200 stuks.

U opent de verpakking, wrijft over het  
mond-neusgedeelte van de reanimatie-




oefenpop, en laat het  
desinfectiedoekje nog 30  
seconden op deze plaats  
liggen. Droog goed na.



**Bescherming**  
**Manikin Face Shields**

Manikin Face Shields zijn een fysieke barrière tijdens de reanimatieoefeningen, verkrijgbaar op rollen (36 stuks) in verpakkingen van 6 rollen. Manikin Face Shields simuleren het gebruik van Resusci Face Shields. Op deze manier leert de cursist zichzelf te beschermen tijdens een reanimatie. Na de les gooit u de Manikin Face Shield weg. De Manikin Face Shield is een educatief product, en kan de Laerdal Face Shield NIET vervangen!

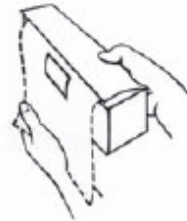





# Hygiëne na de les

- Luchtwegen na de les vervangen
- Gezichtshuid reinigen
- Koppeling verwijderen en reinigen
- Eventueel borsthuid reinigen
- Daarna gezichtshuid desinfecteren

# Ontsmetting van de gezichtshuid

## *Reiniging en ontsmetting*

- reinig de gehele reanimatieoefenpop;
- maak de aangezichtshuid los, en maak de koppeling aan de binnenkant van het gelaat los;

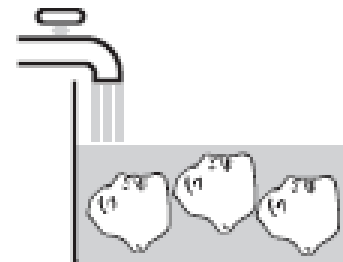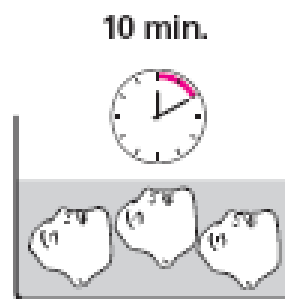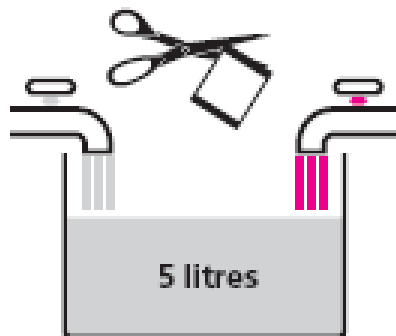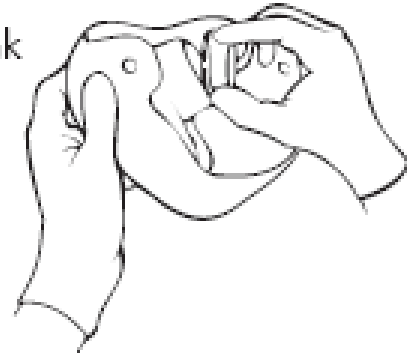


# Reiniging van de gezichtshuid

- reinig (borstel hardnekkige vlekken weg) en ontsmet de aangezichtshuid en de koppeling;
- plaats de aangezichtshuiden in de Virkon®oplossing voor onderdompeling;
- na tien minuten onderdompeling spoelt u de aangezichtshuiden overvloedig, waarna u ze droogt. Bij deze concentratie is het aangewezen beschermhandschoenen te dragen. Vinylhandschoenen worden aangeraden, aangezien latexhandschoenen vlekken kunnen veroorzaken op de aangezichtshuid.

# Vervanging van de luchtwegen


Na elke les vervangt u de luchtweg! Ga als volgt te werk.

Verwijderen van de luchtweg: 1

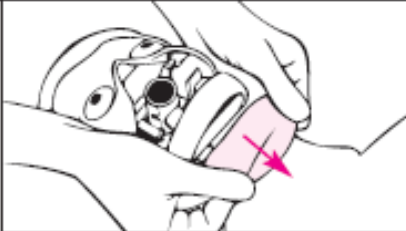


Verwijder de aangezichtshuid en verwijder de nekhuid van de kin;

2

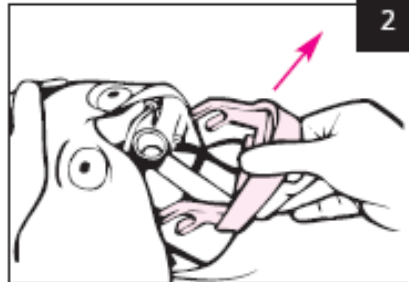


Maak de onderkaak los;

3

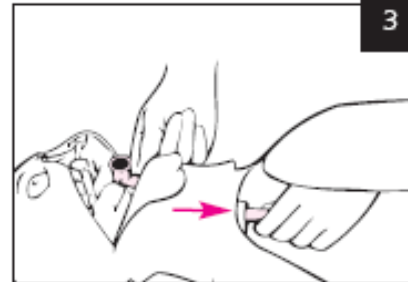

Maak de luchtwegverbinding los van het aangezicht, en trek de inspiratieslang door de nek;

4

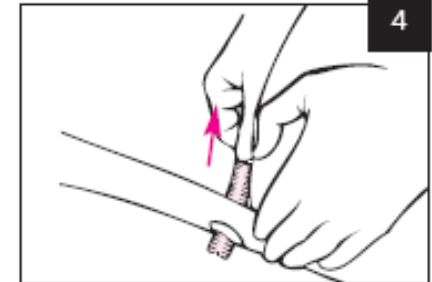


Trek de expiratieslang uit de houder in de zijkant van de pop;




**Laerdal**  
helping save lives

# Vervolg

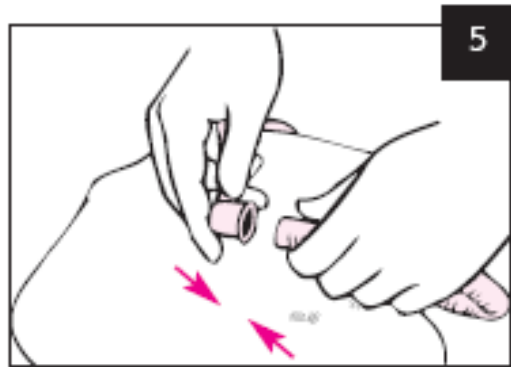


Verbindt de expiratie- en de inspiratie-slang;

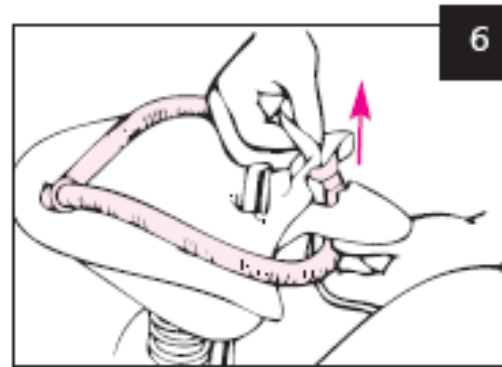

Schuif de slang door de opening in de longplaat om het luchtwegsysteem los te maken;  
Gooi de gebruikte luchtweg weg.


# Plaatsen van nieuwe luchtwegen

Plaatsen van de luchtweg: 1

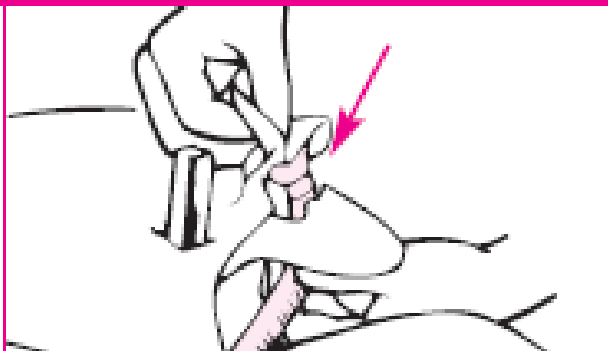


*Schuif de slang door de opening in de longplaat onder de long;*

2

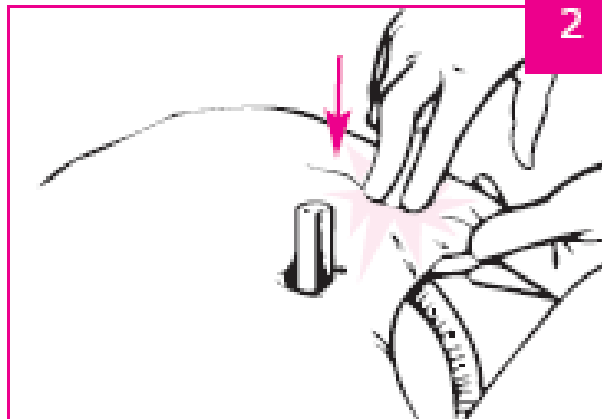


*Druk op de longconnector tot deze goed aan de longplaat is bevestigd. Zorg er voor dat de ventilatieglijder vrij kan bewegen;*


# vervolg

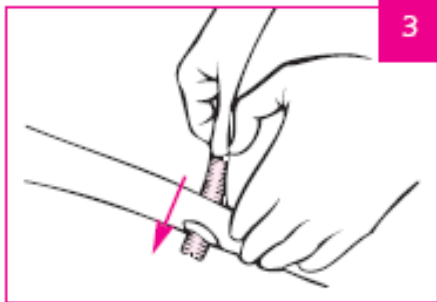


3  
Duw de expiratieslang in de houder aan de zijkant van de pop totdat het uiteinde er 2 a 3 cm uitsteekt;

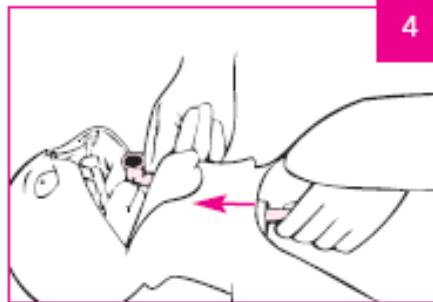

4  
Voer de inspiratieslang door de nek en klik de luchtwegconnector vast in de houder;

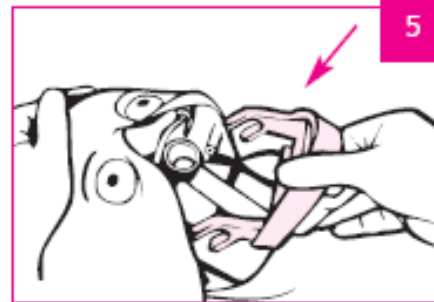

5  
Schuif de gevorkte delen van de onderkaak door over de penne in het hoofd;

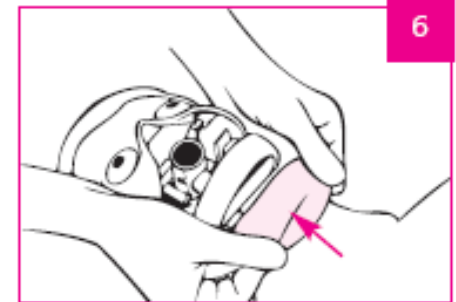

6  
Vouw de nekhuid over de onderkaak en plaats de gezichtshuid.



# Plaatsen van de borsthuid

## **Het opnieuw plaatsen van de borsthuid**

*Zorg ervoor dat het schakelaardekselel van het handplaatsingsmechanisme (a) zich boven het uitstekende einde van de glijder van het ventilatie/compressiemechanisme (b) bevindt. Bevestig de borsthuid aan de torso.*

