

FAQ

Updates nieuwe CPR-richtlijnen 2010



Algemeen

Hoe zie ik of mijn pop al conform de G2010-richtlijnen is?

Poppen die al geüpdate zijn, zijn herkenbaar aan onderstaande sticker met het G2010-logo.



Zijn de update kits gratis?

De update kits zijn gratis voor klanten die de oefenpop bij Laerdal Benelux hebben aangeschaft ná 1 oktober 2010. Dit is uitgezonderd de Resusci Junior. Voor poppen die zijn aangeschaft vóór deze datum wordt de kostprijs van de update kits aangerekend. Deze artikelen kunt u bestellen via onze website, per e-mail of per fax. Software-updates zijn gratis en beschikbaar via onze website.

Hoe kan ik een gratis update kit aanvragen?

Als u in aanmerking komt voor een gratis update kit kunt u deze aanvragen via onze website: <http://www.laerdal.com/nl/docid/48195982/Updates-nieuwe-CPR-richtlijnen-2010> voor de Nederlandse klanten en <http://www.laerdal.com/be-nl/docid/48195982/Updates-nieuwe-CPR-richtlijnen-2010> voor Belgische klanten. U wordt dan gevraagd een kort formulier in te vullen. Vervolgens dient u de update kits zelf te installeren of te downloaden. Let wel, klanten die de producten niet direct bij laerdal Benelux hebben aangeschaft, kunnen de update kits aanvragen bij hun distributeur.

Welke poppen dienen geüpdate te worden?

De volgende oefenpoppen voldoen al aan de G2010-richtlijnen: Baby Anne, Resusci Anne Basic, Resusci Baby basic en Resusci Baby SkillGuide. Hiervoor zijn geen update kits nodig. Alle andere BLS-oefenpoppen dienen geüpdate te worden. Meer informatie hierover vindt u verderop in dit document. Informatie over de update van de Resusci Junior volgt later.

Kunnen de Recording Resusci Anne en de Skillmeter Resusci Anne geüpdate worden naar de G2010-richtlijnen?

Nee, deze oefenpoppen kunnen niet geüpdate worden.

Little Junior

Waarom moet mijn oefenpop geüpdate worden?

De huidige clicker klikt nu op 2.8 cm. De geüpdate oefenpop zal op 5 cm compressiediepte klikken, conform de nieuwe reanimatierichtlijnen.

Wat moet er aangepast worden?

De huidige witte clicker zal vervangen worden door een kortere, grijze clicker.

Hoe weet ik of mijn oefenpop geüpdate moet worden?

Als de oefenpop een witte clicker heeft, is hij niet conform de G2010-richtlijnen.

Hoe kan ik mijn oefenpop updaten?

Vervang de witte clicker door de grijze versie.

Welk artikelnummer heb ik nodig?

Artikelnummer [184511 - Update Kit G2010 Little Junior](#). Dit is inclusief clicker, handleiding en G2010 sticker.

Little Anne / AED Little Anne

Waarom moet mijn oefenpop geüpdate worden?

De huidige clicker klikt op 4 cm. De geüpdate oefenpop zal op 5 cm compressiediepte klikken, conform de nieuwe reanimatierichtlijnen.

Wat moet er aangepast worden?

De huidige witte clicker zal vervangen worden door een kortere, grijze clicker.

LET OP, dit geldt voor oefenpoppen die ná mei 2007 zijn geproduceerd en al conform de G2005-richtlijnen zijn. Oefenpoppen die vóór mei 2007 zijn geproduceerd hebben een 6 mm kortere en minder soepele compressieveer. Voor deze oefenpoppen heeft u een nieuwe clicker en een nieuwe compressieveer (ref. 020510) nodig.

Hoe weet ik of mijn oefenpop geüpdate moet worden?

Als de oefenpop een witte clicker heeft, is het niet conform de G2010-richtlijnen.

Hoe kan ik mijn oefenpop updaten?

Vervang de witte clicker door de grijze versie.

Dit geldt voor oefenpoppen die ná mei 2007 zijn geproduceerd.

Welk artikelnummer heb ik nodig?

Artikelnummer [020113 - Update Kit G2010 Little Anne](#). Dit is inclusief clicker, handleiding en G2010-sticker.

Resusci Anne SkillGuide / AED Resusci Anne SkillGuide

Waarom moet mijn oefenpop geüpdate worden?

De oefenpop dient de juiste compressiediepte aan te geven op 5cm. De SkillGuide unit zal geüpdate worden en als feedback zal niet langer "te diep" worden aangegeven.

Wat moet er aangepast worden?

De sensor unit met zwarte compression slide (153700) dient vervangen te worden door een nieuwe sensor unit met een grijze compression slide.

LET OP, oefenpoppen van vóór 2000 hebben een borsthuid waar de bevestigingsgaatjes in de borsthuid op een andere plek zitten. Klanten die dit type pop in hun bezit hebben, dienen apart borsthuid te vervangen om aan de G210-richtlijnen te voldoen. De borsthuid maakt geen deel uit van de G210-update kit.

Hoe weet ik of mijn oefenpop geüpdate moet worden?

Verwijder de borsthuid en bekijk de sensor unit die aan de longplaat vastzit. Als de sensor unit een zwarte compression slide heeft, dient de oefenpop geüpdate te worden.



Let **alleen** op deze slider. Als deze zwart is, is de sensor unit niet conform de G210-richtlijnen en dient deze geüpdate te worden.

Hoe kan ik mijn oefenpop updaten?

Vervang de sensor unit met zwarte compression slide door de nieuwe sensor unit met een grijze compression slide.

Welk artikelnummer heb ik nodig?

Artikelnummer [153711 - Update Kit G210 Resusci Anne SkillGuide](#). Dit is inclusief unit, handleiding en G210-sticker.

Hoe komt het dat het rode lichtje in mijn SkillGuide niet meer werkt?

De ERC Resuscitation Guidelines geven geen maximale compressiediepte aan, vandaar dat het rode lichtje voor de compressie-feedback gedesactiveerd is.

Resusci Anne SkillReporter / AED Resusci Anne SkillReporter / Resusci Anne QCPR-D / Resusci Anne CPR-D

Waarom moet mijn oefenpop/SkillReporter unit geüpdate worden?

De oefenpop dient de juiste compressiediepte aan te geven op 5cm en als feedback zal niet langer "te diep" worden aangegeven. Het compressieritme zal geüpdate worden naar 100/min.

Wat moet er aangepast worden?

Dit product heeft een algehele software update nodig voor de SkillReporter unit en de oefenpop.

Update oefenpop: dit zorgt ervoor dat de compressiedata die is opgeslagen in de oefenpop-software correct wordt berekend en weergegeven als het wordt geprint.

Update SkillReporter unit: de compressie-feedback "diep genoeg" is aangepast van 38 mm naar 50 mm. Er wordt niet meer aangegeven dat de compressies "te diep" zijn.

LET OP, net als voor de Resusci Anne SkillGuide geldt ook voor de Resusci Anne SkillReporter: oefenpoppen van vóór 2000 hebben een borsthuid waar de bevestigingsgaatjes in de borsthuid op een andere plek zitten. Klanten die dit type pop in hun bezit hebben, dienen apart de borsthuid te vervangen om aan de G2010-richtlijnen te voldoen. De borsthuid maakt geen deel uit van de G2010-update kit.

Hoe weet ik of mijn oefenpop geüpdate moet worden?

Sluit de SkillReporter unit aan op de Resusci Anne SkillReporter en print een rapport uit.

Om een rapport af te drukken: houdt de toets "short print" ingedrukt, toets dan "long print" en laat beide los. Check de software versie voor de oefenpop en SkillReporter. De G2010-software voor de oefenpop is versie **4.1**. Als de klant een andere versie heeft, dient dit geüpdate te worden.

Hoe kan ik mijn oefenpop/SkillReporter unit updaten?

De software kan geüpdate worden via

<http://www.laerdal.com/nl/ProductDownloads.aspx?productId=117> voor Nederlandse klanten en <http://www.laerdal.com/be-nl/ProductDownloads.aspx?productId=117> voor Belgische klanten.

Hoe komt het dat het rode lichtje in mijn SkillReporter unit niet meer werkt?

De ERC Resuscitation Guidelines geven geen maximale compressiediepte aan, vandaar dat het rode lichtje voor de compressies gedesactiveerd is.

Welk artikelnummer heb ik nodig?

De software is beschikbaar op

<http://www.laerdal.com/nl/ProductDownloads.aspx?productId=117> voor Nederlandse klanten en <http://www.laerdal.com/be-nl/ProductDownloads.aspx?productId=117> voor Belgische klanten. Hier wordt alleen gevraagd een kort formuliertje in te vullen.

LET OP, er zijn twee kabels nodig voor de update (één voor de oefenpop en één voor de SkillReporter unit).

Als een klant deze kabels niet (meer) in zijn bezit heeft, kan dit besteld worden via de referentie **315950**. Dit is inclusief een CD met geüpdate software, twee kabels en een G2010-sticker.

Laerdal PC SkillReporting

Waarom moet dit product geüpdate worden?

Het product heeft een algehele software update nodig om aan de G2010-richtlijnen te voldoen.

Wat moet er aangepast worden?

De PC SkillReporter software dient geüpdate te worden. De feedback “diep genoeg” op de borstcompressies is aangepast van 38 mm naar 50 mm. Er wordt niet meer aangegeven dat de compressies “te diep” zijn.

Hoe weet ik of dit product geüpdate moet worden?

Selecteer “Help” in de toolbar. De software versie **2.4** voor de PC SkillReporting is conform de G2010-richtlijnen. Als de klant een andere versie heeft, dient dit geüpdate te worden.

Hoe kan ik dit product updaten?

De software is online beschikbaar via

<http://www.laerdal.com/nl/ProductDownloads.aspx?productId=237> voor Nederlandse klanten en <http://www.laerdal.com/be-nl/ProductDownloads.aspx?productId=237> voor Belgische klanten.

Download de laatste PC SkillReporter software-versie en installeer dit op de PC.

Welk artikelnummer heb ik nodig?

De software is beschikbaar op

<http://www.laerdal.com/nl/ProductDownloads.aspx?productId=237> voor Nederlandse klanten en <http://www.laerdal.com/be-nl/ProductDownloads.aspx?productId=237> voor Belgische klanten.

Hier wordt alleen gevraagd een kort fomuliertje in te vullen..